

Mío Up

Tonifica la musculatura de abdomen, muslos, glúteos brazos (bíceps, tríceps) y espalda, produciendo una contracción muscular por encima de la contracción que se puede lograr con el ejercicio normal.

Lanzamiento Exclusivo



- Hasta **30 mil** contracciones musculares en 30 minutos.
- Alta energía electromagnética de **7 teslas**



¿De qué se trata el equipo?

Mio-Up es un equipo de **Pulsos Magnéticos Focalizados** utilizado para generar contracciones musculares rítmicas a alta intensidad en periodos cortos de tiempo.

La **alta energía electromagnética de 7 teslas** generada por el equipo, atraviesa la piel y el tejido adiposo hasta llegar al músculo, el cual es estimulado a contraerse hasta 30.000 veces en un periodo de 30 minutos. Algo que es imposible para la función cerebral normal.



¿Cómo es el protocolo de tratamiento?

Una sesión semanal de al menos 30 minutos. En cada caso particular se deberá tener en cuenta las características de sexo, edad físicas del paciente a aplicar, siendo las contracciones más intensas cuanto mejor sea el estado físico del paciente.

Normalmente se requieren 2 a 4 sesiones para disminuir tejido adiposo en un 19% y de 4 a 6 sesiones para incrementar masa muscular en un 16%.



¿Qué resultados se obtienen y cuándo?

El objetivo de la terapia es lograr contracciones supramaximales que no pueden generarse mediante el ejercicio físico intenso.

Estas contracciones se producen porque el equipo no permite la relajación del músculo entre dos estímulos consecutivos lo obliga al tejidos muscular a consumir energía para mantener la contracción.

La energía demandada, luego de varios estímulos, proviene de las reservas de tejido adiposo, por lo que el uso continuo disminuye la adiposidad localizada a la vez que aumenta el tamaño de las fibras musculares como adaptación a las condiciones de sobreexigencia.



- Aumento del tejido muscular.
- Aumento de la fuerza y la firmeza.
- Disminución de la adiposidad localizada.
- Aumento del retorno venoso.
- Disminución de la celulitis.



¿Quiénes pueden realizarse esta terapia?

Pacientes de sexo masculino y femenino que desean disminuir adiposidades y tonificar musculatura de:

- Abdomen.
- Glúteos
- Muslos.
- Pantorrillas.
- Biceps, triceps.
- Espalda.



¿Se puede realizar en cualquier época del año?


Si, al ser un procedimiento no invasivo puede aplicarse durante todo el año.

Cuidados previos

No requiere cuidados previos. Al ser un procedimiento no invasivo puede aplicarse durante todo el año.

Cuidados posteriores

No realizar ejercicio intenso inmediatamente posterior a la sesión. Beber agua y consumir alimentos con bajo contenido graso y alto contenido proteico para favorecer la reconstrucción muscular.

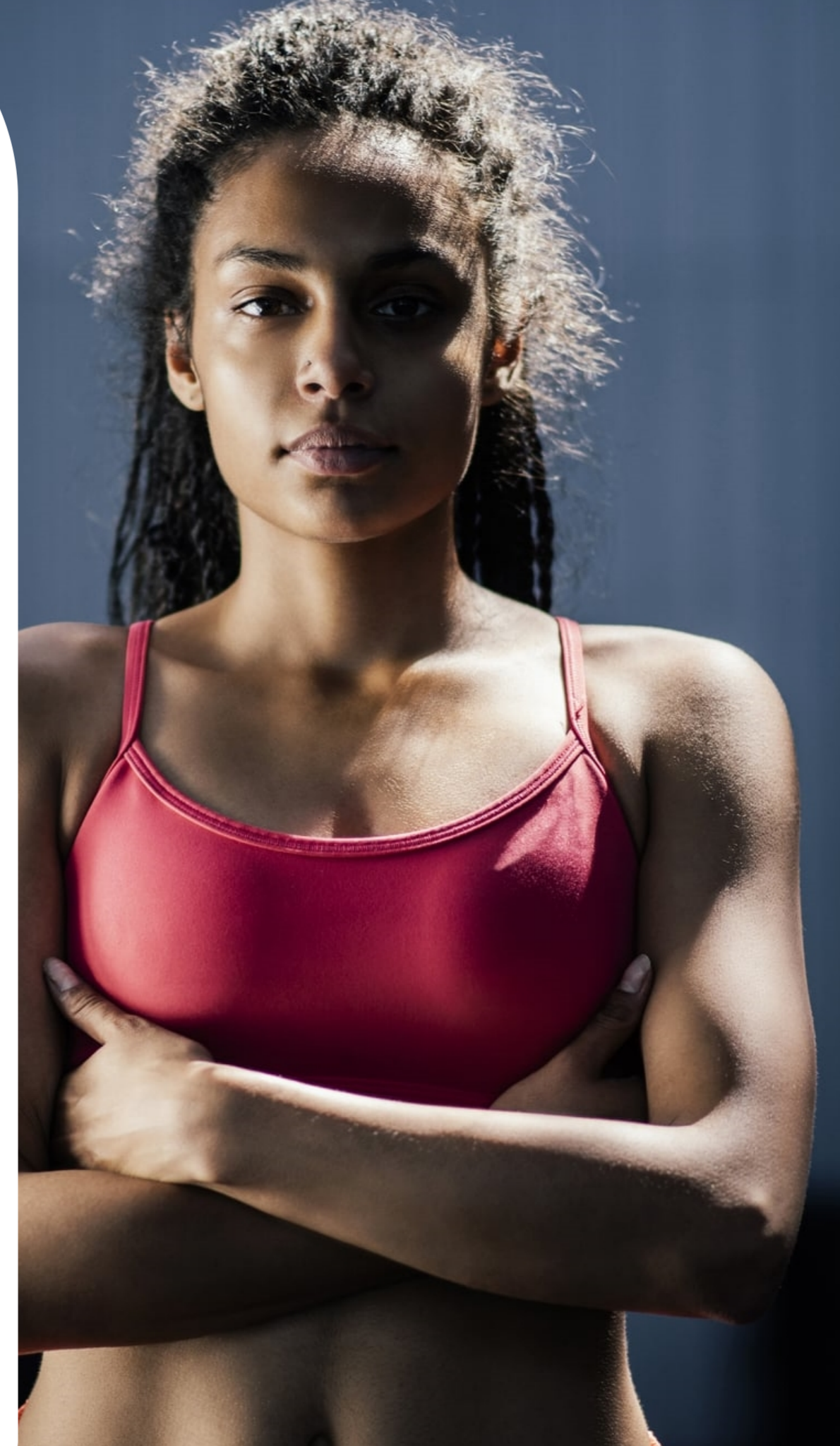


Combinación con otras terapias

Para optimizar resultados es aconsejable combinar el tratamiento con equipos que generen aumento de la temperatura local como INFINITY SEVEN el cual ayuda a aumentar las reacciones catabólicas sobre el tejido graso mientras que Mio UP consume la energía para ser utilizada en las contracciones musculares repetitivas.

Programación del equipo

El equipo cuenta con 2 cabezales que pueden ser configurados de manera independiente. Los parámetros configurables son sexo, edad, área de tratamiento y objetivo del mismo. A su vez se puede modificar el tiempo y la intensidad de aplicación.

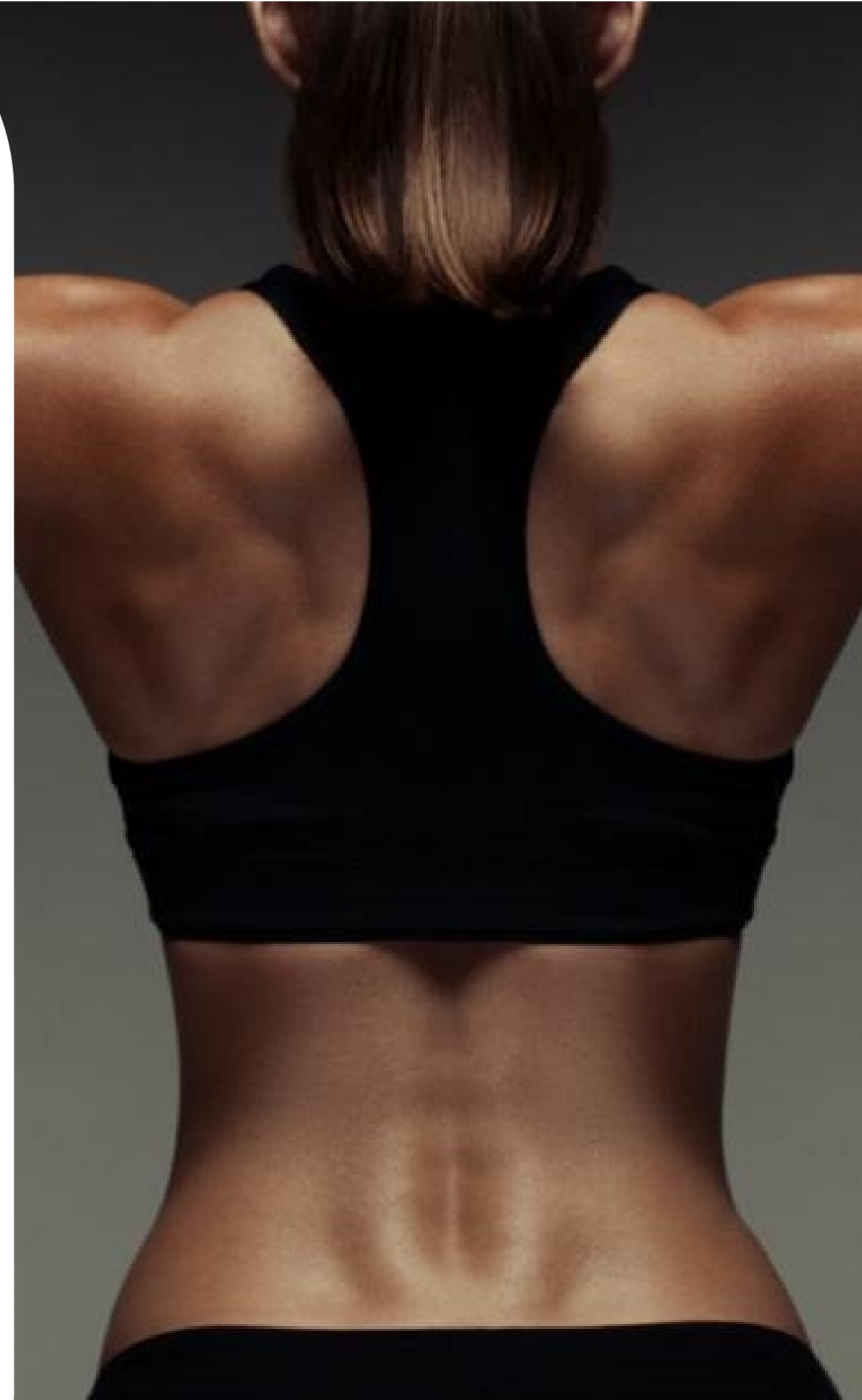

Datos técnicos:

- Intensidad del campo magnético 70000 Gauss o 7 Teslas.
- Frecuencia de contracciones hasta 100 Hz.
- Peso 69.8 Kg.
- Sistema de refrigeración por agua.



¿En quienes está indicado?

Pacientes que quieren modelar su figura, disminuir tejido adiposo y aumentar masa muscular como complemento a la actividad física y la buena alimentación.





Contactáanos

WhatsApp: +549 (351) 674 0622
info@starbene.com

Casa Matriz

David Luque 511
Córdoba Capital, Argentina.

Chateá Con Nosotros

www.starbene.com



Mío Up